


دفتربه راهنمای میکرو اره هندپیس رفت و برگشتی | نوسان Saggital

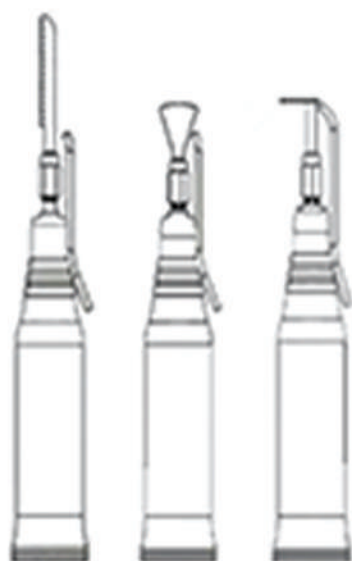

XTDZ-7-R XTDZ-8-S XTDZ-10-0



بالا و پایین رفت و برگشت



سازیتال رفت و برگشتی



چپ و راست نوسانی




اتصال نوع E

- هندپیس برای برش و جداسازی مکانیکی استخوان‌ها در جراحی مجسمه فک و صورت
- دستگاه پزشکی را تمیز، ضد عفونی و روغن کاری کنید.
- دستگاه پزشکی، تیغه های اره، لوله خنک کننده، آچار و پاک کننده نازل را استریل کنید.
- برای حرکت سازیتال، نوسانی یا متقابل

نوع	XTD-7-R	XTD-8-S	XTD-10-0
نسبت انتقال	3.2:1	4:1	4:1
ضربه ها زوایا	1.8 MM	3°	
فرکانس (ضربه در دقیقه)	12.300	12.300	12.300
حداکثر سرعت دور	40,000min-1	40,000min-1	40,000min-1
جهت کار	متقابل	نوسان دار	سازیتال

فنی:

تیغه اره رفت و برگشتی بالا و پایین


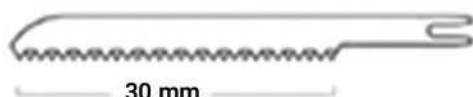


تیغه اره رفت و برگشتی عقب و جلو




تیغه اره رفت و برگشتی چپ و راست



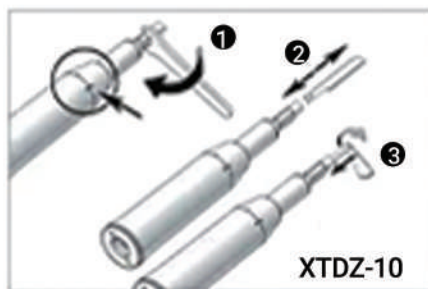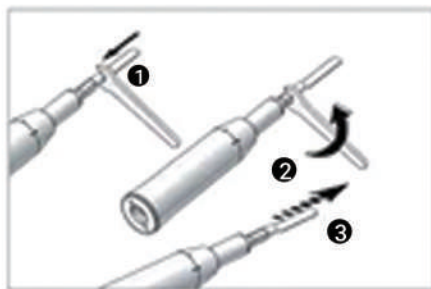

XTDZ-10

تیغه اهر را تعویض کنید

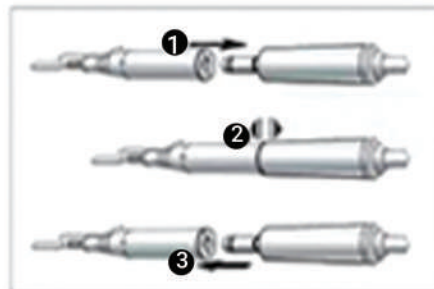

حذف و مونتاژ

پیچ گیره را با آچار یا با دست باز کنید. اطمینان حاصل کنید که غلاف بسته باقی می ماند.
تیغه اهر را تا حد مجاز وارد کنید یا آن را بردارید.
آچار را به سمت پیچ گیره هدایت کنید و از آچار استفاده کنید
پیچ گیره را محکم کنید

دستگاه پزشکی را در حین کار مونتاژ یا خارج نکنید.
- هندپیس را به موتور وصل کنید.
- مطمئن شوید که هندپیس کاملاً با موتور درگیر شده است
- دستگاه موتور را بردارید

نکات ایمنی

- هر بار قبل از استفاده، دستگاه پزشکی را از نظر آسیب یا لق شدن قطعات بررسی کنید.
- اگر دستگاه پزشکی آسیب دیده است از آن استفاده نکنید.
- فقط زمانی که میکروموتور در حالت توقف کامل قرار دارد، دستگاه پزشکی را به میکروموتور متصل کنید

- از گرمای بیش از حد در محل درمان خودداری کنید.
- از حداکثر گشتاور مجاز تجاوز نکنید.
- تیغه اهر فقط زمانی باید برداشته شود که دستگاه پزشکی در حالت استراحت باشد.
- فقط از تیغه اهر ای استفاده کنید که در شرایط عالی قرار دارد و هنگام حرکت تیغه اهر مراقب باشید.

تعمیر و نگهداری

تمیز کردن

- (1) پارچه یا برس را با ایزوپروپیل خیس کنید.
- (2) تمام سطح زاویه و سر زاویه را با پارچه یا برس مرطوب با ایزوپروپیل الکل پاک کنید تا مواد خارجی از بین برود.
- (3) اگر جسم خارجی در زوایای هدپیس پیدا شد، فرآیند تمیز کردن را تکرار کنید.


◀ استفاده از ابزار نوک تیز برای پاک کردن دستگاه و قطعات آن مجاز نمی باشد.
در غیر این صورت، می تواند به نوری آسیب برساند، که می تواند منجر به کاهش روشنایی نور شود.
◀ استفاده از مایع اسید قوی یا محلول استریل شده برای پاک کردن یا تمیز کردن دستگاه ممنوع است.



هشدار

تعمیر و نگهداری

روغن کاری

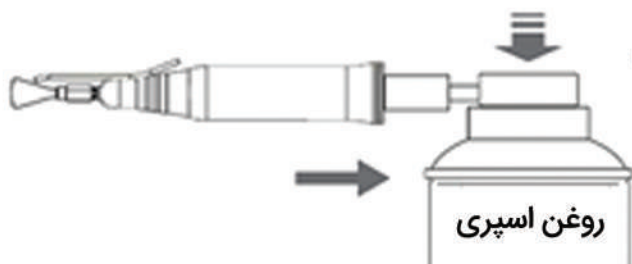

- (1) با استفاده از یک آداپتور اسپری، قسمت های روان کننده ها را روغن کاری کنید.
- (2) چرخه روغن کاری پس از استفاده، 30 دقیقه یا حداقل دو بار در روز هندپیس را تمیز یا روغن کاری کنید.

پس از جدا شدن کامل هندپیس و ابزار چرخشی، سیستم آب باید استریل شود. پارامترهای توصیه شده برای استریلیزاسیون تایید شده توسط سازنده به شرح زیر است.

نوع چرخه	دما	مدت زمان قرارگیری در معرض بیمار	زمان خشک شدن
پیش وکیوم	135°C (275°F)	18 دقیقه	30 دقیقه
جابه جایی جاذبه	135°C (275°F)	10 دقیقه	30 دقیقه

پس از اتمام استریلیزاسیون باید بررسی شود که آیا دستگاه کاملاً خشک شده است یا خیر.

